



English

1. To determine the mounting positions on the floor, place the support (052.7255) at the desired position in front of the wall. Make sure the distance between the wall and the support is **not less than 48mm or greater than 75mm!** Then fix the support to the floor.
2. To determine the mounting positions for the wall bracket, mount the lifting column (A) together with wall bracket (B) temporarily on the support. See also steps 1,2 and 3 of installation instruction 052.7200/052.7250.

Once the wall bracket part (B1) is fixed to the wall, mount the lifting column **permanent** on the support. Use washer (c) and bolts(d) to fasten parts (B1) and (B2) of the wall bracket. Then continue with step 4 of installation instruction 052.7200/052.7250.

Nederlands

1. Plaats de steunvoet (052.7255) op de gewenste positie voor de wand en bepaal de montageposities op de vloer. Zorg er voor dat de afstand tussen de wand en de steunvoet **niet kleiner dan 48mm of groter dan 75mm is!** Bevestig vervolgens de steunvoet aan de vloer.
2. Monteer de hefkolom (A) met muurbeugel (B) tijdelijk op de voetsteun om de montagepositie van de muurbeugel te bepalen. Zie hiervoor ook de stappen 1, 2 en 3 van installatie instructie 052.7200/052.7250.

Zodra de muurbeugel deel (B1) aan de wand gemonteerd is, monteer de hefkolom nu **definitief** op de steunvoet. Monteer vervolgens de delen (B1) en (B2) van de muurbeugel aan elkaar. Gebruik hiervoor sluitring (c) en boutje (d). Ga vervolgens verder met stap 4 van installatie instructie 052.7200/052.7250.